



**MoustiClick** est une méthode révolutionnaire et efficace pour éliminer les conséquences des **piqûres d'insectes**.

Trop souvent, nos nuits d'été sont gâchées par les moustiques. La **démangeaison** que provoque leur piqûre est tenace. Et si on cède à la tentation de se gratter, cela conduit à des irritations de la peau bien plus sérieuses que celles de la piqûre initiale.

Son fonctionnement se basant sur la piezo-électricité, le MoustiClick ne nécessite pas de pile pour son fonctionnement, il est pratique et commode.

Il est généralement admis aujourd'hui que les réactions locales aux piqûres d'insectes telles que démangeaisons, brûlures, douleurs et gonflements sont éliminées en quelques minutes par **réduction ou inhibition de libération d'histamine**. De plus les substances irritantes ou nocives introduites sous la peau par le moustique sont dénaturées et donc inactivées par le passage des impulsions électriques.

#### **Comment utiliser MoustiClick ?**

Pour obtenir de meilleurs résultats, il est conseillé d'utiliser MoustiClick le plus tôt possible après la piqûre d'insecte. C'est pour cela qu'il faut toujours l'avoir à portée de main.

Tenir l'appareil comme une seringue. Appliquer la partie fuselée de Mousticlick sur la piqûre et presser le bouton plusieurs fois. Le nombre de pressions à exercer est fonction du résultat désiré:

- **4 à 5 impulsions sont suffisantes pour éliminer la démangeaison,**
- **8 à 10 impulsions sont nécessaires pour empêcher l'apparition d'un gonflement.**

**Chez les enfants** et certains adultes, il faut diviser le nombre d'impulsions par deux.

Dans le cas de personnes particulièrement sensibles aux piqûres d'insectes, au contraire, il est nécessaire de multiplier les impulsions et, éventuellement, de les répéter dans le temps. L'effet de MoustiClick est perceptible quelques minutes à peine après son utilisation.

**MoustiClick** est recommandé pour lutter contre les effets des piqûres de moustiques, de taons et de méduses ainsi que pour toutes démangeaisons.

Caractéristiques techniques: Tension de charge 13 kV. Courant de charge 0,7 mA. Durée de l'impulsion 0,01 ms . Dimensions diamètre 24 mm . Longueur totale 63 mm . Poids 10 grammes. Alimentation piezo-électricité . Durée d'utilisation environ 25000 impulsions.

#### **AVERTISSEMENT:**

Ne pas utiliser après l'application ou en présence de substances inflammables. Évitez l'utilisation près des zones sensibles (yeux, bouche,...).

L'utilisation de MoustiClick est déconseillée aux porteurs de piles cardiaques et aux personnes cardiaques. MoustiClick peut être utilisé par les adultes et les enfants de plus de 6 mois. Désinfecter régulièrement, notamment après utilisation sur des plaies non cicatrisées et dans le cas d'utilisation sur plusieurs personnes.

