

**Guide rapide** pour une bonne utilisation du

**THERMOFOCUS®**

## 1. CALIBRER :

A : **Appuyez** sur les boutons  et  **en même temps.**


Il apparait alors à l'écran :

CAL

B : **Appuyez** sur le bouton  et

Faite une mesure près de vous sur une surface à **température ambiante.**

## 2. PRISE DE LA TEMPERATURE :

**Appuyez** sur le bouton  et **maintenez** appuyé !

**Superposez les 2 ronds rouges au milieu du front !**

**Relâchez** le bouton et

**attendez l'arrêt** du clignotement, **sans bouger** le thermomètre.

Voilà, c'est fait !

